


# INSTRUCTIEKAART

## Aansluiten van de nieuwe Sondevoedingfles



### 1 Voorbereiding

Om passage van de voeding te bevorderen adviseren wij in een halfzittende positie te voeden en deze positie tot een half uur na het voeden aan te houden.

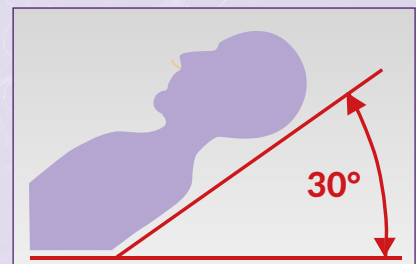

1. Verzamel alle benodigdheden (fles sondevoeding, Flocare toedieningsysteem, pomp etc.)
2. Maak de werkplek schoon
3. Was de handen met zeep en droog ze af met een schone handdoek



- 3 Verwijder de verpakking van het toedieningsysteem.



- 4 Verwijder het kapje van de plus connector.



Zorg dat plusvormige connector onder het kapje niet met de vingers wordt aangeraakt om besmetting te voorkomen.



**5** Open de flip-top dop.



Zorg dat de plusvormige poort niet met de vingers wordt aangeraakt om besmetting te voorkomen.



**6** Zet de fles rechtop om het toedieningssysteem met de fles te kunnen verbinden. De plusvormige connector(+) op het toedieningssysteem dient verbonden te worden met de plusvormige poort(+) op de fles.



**7** Het is belangrijk om eerst het toedieningssysteem door de seal heen te duwen voordat het systeem wordt vastgedraaid.



**8** De fles is nu aangesloten en er kan gevoed worden volgens de normale werkwijze.

